


sertsa[®]
КАМПРЭСІЙНЫ ТРЫКАТАЖ

Парадак зняцця мерак і вызначэння памераў

Зняць анатамічныя меркі ў названых кропках нагі, супаставіць іх з прыкладзенай табліцай памераў і вызначыць маркіроўку выраба. Гэта робіць кансультант медтэхнікі, лекар альбо пацыент самастойна.


Пры вызначэнні памеру, калі ласка, надасце належную **ўвагу зняццю мерак**. Ад правільнага вызначэння памеру залежыць правільнае функцыянаванне панчоха / гольфа. Зняцце мерак неабходна праводзіць раніцай, так як на працягу дня канечнасці ацякаюць. Вымерайце ўсе кропкі, паказаныя ў табліцы памераў для дадзенага выраба. Як выраб павінен апрацацца на канечнасць, паказана на малюнках.

ПАМЕР. Панчохи кампрэсійныя **sertsa**[®]

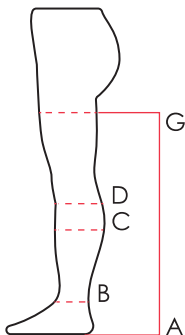


ПАМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AG – даўжыня ад пяткі да ўзроўню G	69-75	69-75	69-75	69-75	69-75
G – акружнасць сцягна на 5 см ніжэй пахвіны	44-52	48-56	52-60	56-64	60-68
D – акружнасць пад каленам	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – акружнасць ікры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – акружнасць шчыкалаткі	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

ПАМЕР. Гольфы кампрэсійныя **sertsa**[®]

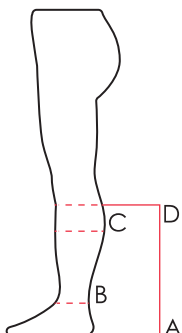


ПАМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AD – даўжыня ад пяткі да ўзроўню D	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42
D – акружнасць пад каленам	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – акружнасць ікры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – акружнасць шчыкалаткі	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

ПАМЕР. Панчохі антыэмбалічныя sertsa®

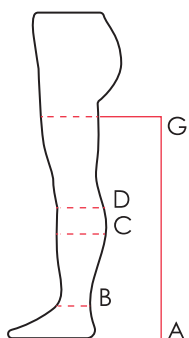

ПАМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AG – даўжыня ад пяці да ўзроўню G	71-77	71-77	71-77	71-77	71-77
G – акружнасць сцягна на 5 см ніжэй пахвіны	52-58	57-63	61-67	64-70	67-73
D – акружнасць пад каленам	31-35	34-38	37-41	39-43	41-45
C – акружнасць ікры	32-36	35-39	38-42	40-44	42-46
B – акружнасць шчыкалаткі	19.5-22.5	22.5-25.5	25.5-28.5	27.5-30.5	29.5-32.5

ПАМЕР. Гольфы антыэмбалічныя sertsa®

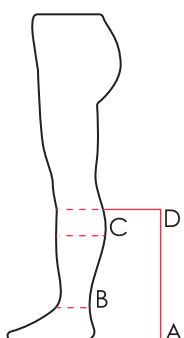

ПАМЕР (см)	S	M	L	XL	XXL
AD – даўжыня ад пяці да ўзроўню D	36-42	36-42	36-42	36-42	36-42
D – акружнасць пад каленам	28-34	31-37	34-40	37-43	40-46
C – акружнасць ікры	30-36	33-39	36-42	39-45	42-48
B – акружнасць шчыкалаткі	19-23	21-25	23-27	25-29	27-31

Сведчанні да ўжывання кампрэсійнага трыкатажу sertsa®

1-й клас кампрэсіі (ад 15 да 21 мм рт. ст.)

- Функцыянальныя флебапатыі (сіндром «цяжкіх ног»)
- Рэтыкулярны варыкоз, тэлеангіктазія (сасудзістыя "зорачкі")
- Прафілактыка варыкознай хваробы ног падчас цяжарнасці і пасля родаў
- Прафілактыка варыкознай хваробы ног пры наяўнасці фактараў рызыкі
- Адалены перыяд рэабілітацыі (>3 месяцаў) пасля хірургічнага лячэння варыкознай хваробы

2-й клас кампрэсіі (ад 23 да 32 мм рт. ст.)

- Прафілактыка тромбозу глыбокіх вен у пацыентаў групы рызыкі
- Прафілактыка тромбаэмбалічных ускладненняў у пацыентаў пасля хірургічных, траўматалагічных, гінекалагічных аперацый, з доўгім пасцельнай рэжымам
- Ранні перыяд рэабілітацыі пасля хірургічнага або ін'екцыйнага лячэння варыкознай хваробы (флебэктаміі, склерааблітэрацыі)
- Варыкозная хвароба вен ніжніх канечнасцяў без трафічных парушэнняў (адзінкавыя пашыраныя вены да 5 см)
- Востры і хронічны тромбафлебіт паверхневых вен

Фактары рызыкі развіцця варыкознай хваробы



Праца на нагах



Спадчынная схільнасць



Маларухомы лад жыцця



Залішняя маса цела



Частыя пералёты на самалётах і пастаяннае выкарыстанне аўтамабіля



Цяжарныя жанчыны і маладыя мамы



Узроставыя змены



Працяглы прыём гарманальных прэпаратаў